

# 金姆健康操作指南

V2.4

注册金姆ID



手机桌面打开“金姆健康”



进入登录页后点击“注册金姆ID”

## 注册金姆ID



点击“我没有金姆ID，现在注册”



输入手机号并获取短信验证码

点击“阅读并同意《免责条款与隐私协议》”

点击“下一步”

10:27

← 完善资料

为了您能更好的享受到金姆的健康服务，请完善以下必填资料，金姆承诺不会向第三方提供您的隐私信息。

\*设置密码 8-20个字符，同时包含数字和字母

\*确认密码 请重新输入密码

\*昵称 1-15个字符

\*性别 请选择性别

ⓘ 性别设置后不可更改

\*生日 请选择生日

\*身高 请选择身高（厘米）

\*体重 请选择体重（千克）

\*语言 请选择常用语言

保存

完善个人资料后点击“保存”

购买&激活






## 方式一

点击“检测”进入检测页面

点击“购买”

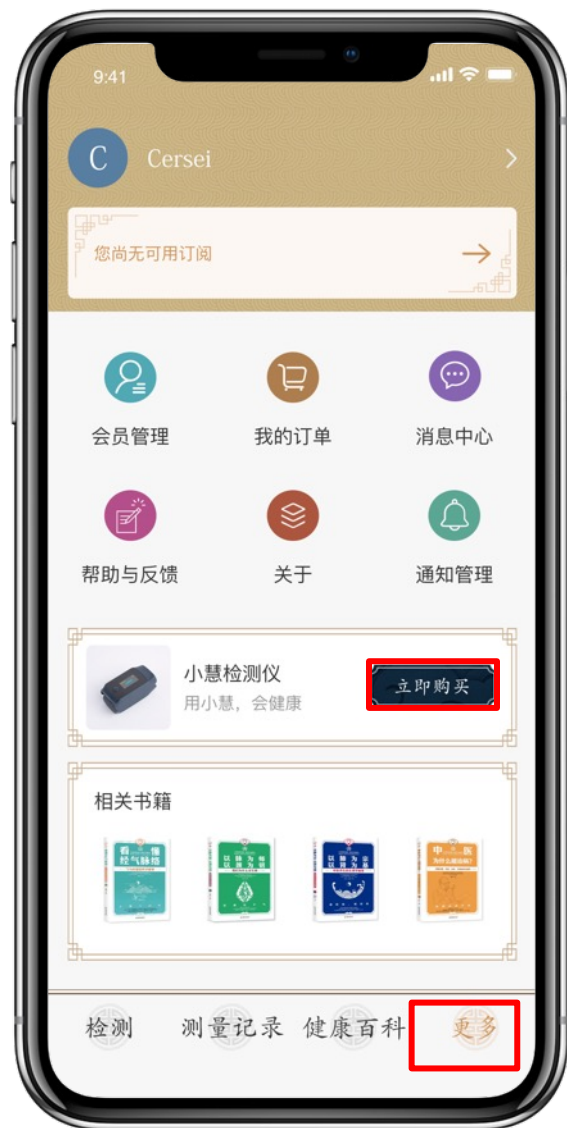

## 方式二

点击“更多”进入更多页面

点击“立即购买”按钮



选择想要购买的版本进行购买



若单独购买软件则系统会帮您自动激活

若购买产品包含小慧检测仪硬件则需等待收货

收到货后进入App首页

点击“激活”



输入激活码，点击“下一步”



点击“立即激活” 激活订阅



激活码只可激活一次

如出现激活错误

请核对是否已被激活或输错激活码

如要和其他人共享软件

可以把您设置好的手机号和密码告知他人进行登录

订阅一经激活, 立即开始计时



方式三（针对iOS用户）

点击“更多”进入更多页面

点击提示栏“您尚无可用订阅”后的“箭头”





可单独购买软件订阅  
购买成功后则系统自动激活

续费



## 方式一

点击“检测”进入检测页面

点击“去续费”



## 方式二

点击“更多”进入更多页面

点击“立即续费”



点击“确认并支付”



确认当前续费账号  
点击“确认”

# 连接检测仪

## 连接检测仪



点击“检测”进入检测首页

在检测首页点击提示框

自动跳转去开启蓝牙





蓝牙打开即可，不要进行配对

“金姆健康” App会自动连接

## 连接检测仪



蓝牙打开后

继续在检测首页点击提示栏

## 连接检测仪



如有多台检测仪

请核验当前使用检测仪的mac地址

(在检测仪屏幕的左上角)

点击“选择”选中检测仪并自动跳转回首页



直到提示栏显示

“当前连接的检测仪MAC:XXXXXXXXXXXX”

则代表检测仪已连接成功

# 体验测量&会员测量

## 体验测量&会员测量



首页面左上角有“体验测量”和“会员测量”  
“体验测量”更适合服务首次体验或难得测量的客户  
省去了建档的时间，测完后一样会有检测报告

“会员测量”更适合服务经常测量的客户  
建立会员档案后  
每次的测量报告都会保存在专人档案下  
还有健康趋势功能

结果输出考虑了前面几天的测量结果  
如果需要瞬时状态，要使用“体验测量”



首页面默认为体验测量

检测仪连接成功后

根据客户性别选择男或女



选择男女后测量按钮变为实色

测量者把左/右手食指指腹朝下放入检测仪

双手平放在桌面上

然后根据情况选择左/右手测量





测量时请端坐于椅子上

除了坐姿以外的测量姿势都不行  
不要跷二郎腿、不要乱动、不要说话

保持心平气和很重要



## 查看分析报告

报告包括心率、血氧、风险预估、  
体质辨证、脏腑辨证、理疗指数、调理建议、  
局部脉搏波形图、经络柱状图

## 体验测量&会员测量




点击报告右上角分享按钮可将报告转发

## 体验测量&会员测量



点击下方“测量记录”按钮  
即可查看对应的测量记录

## 体验测量&会员测量

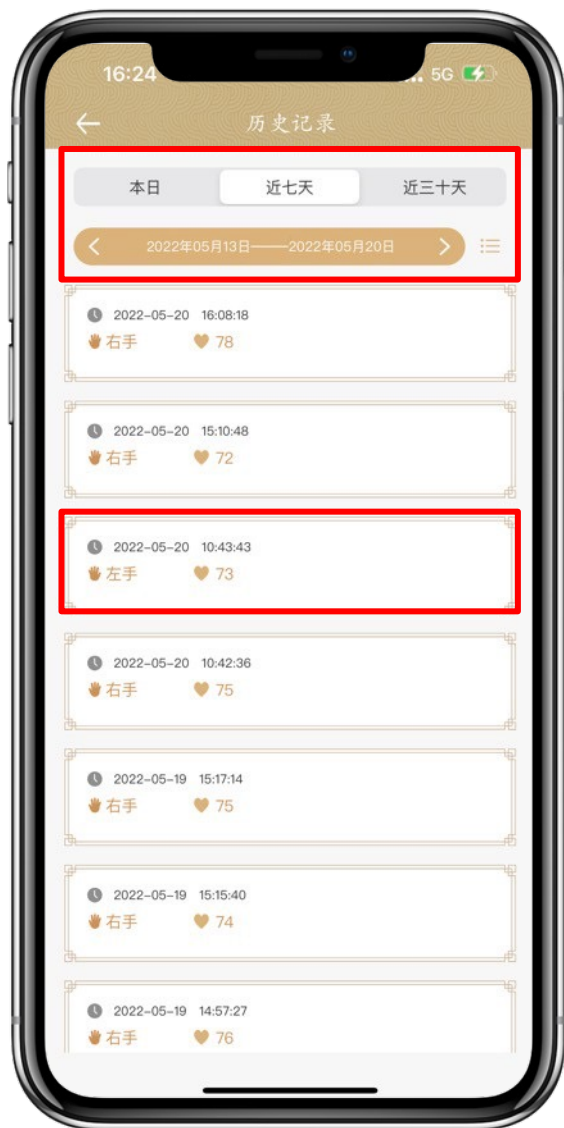


因体验测量记录是所有人的报告都混在一起的

可点击本日/近七天/近三十天快捷按钮快速查找报告

也可点击起始日期与结束日期上下滑动选择时间范围

然后点选想要查看的报告

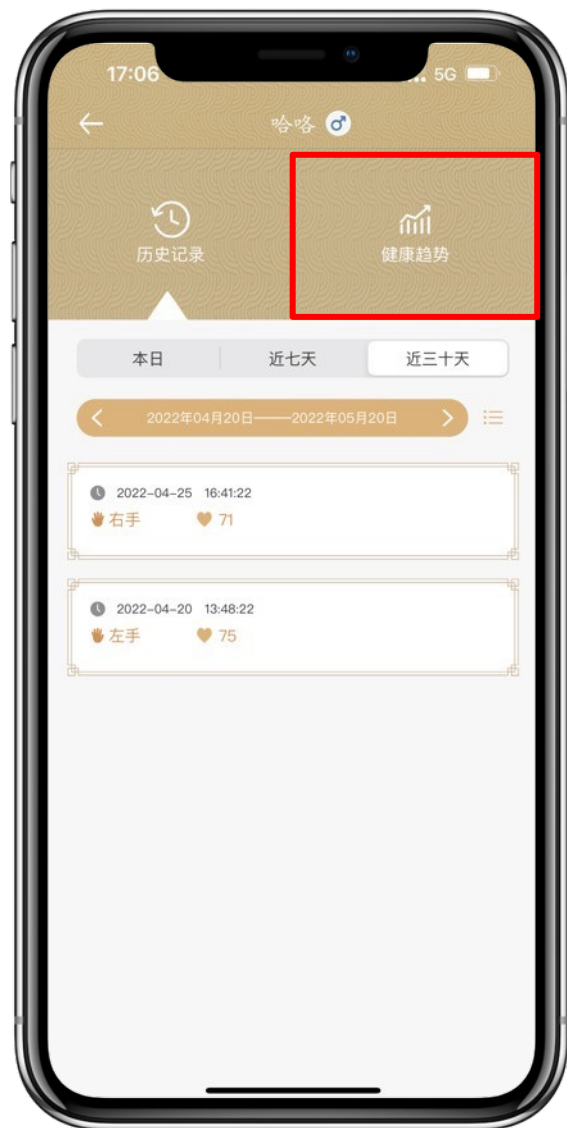

会员档案有健康趋势功能

点击健康趋势可以查看周报告和月报告

周报告需测量满三天五次

月报告需测量满十天十五次

添加会员



## 方式一

点击检测页面左上角“会员测量”

再点击“切换会员”按钮



# 添加会员



点击右上角“添加会员”按钮

# 添加会员

09:29

← 添加会员

\*昵称 1-15个字符

\*性别 请选择性别

性别设置后不可更改

\*生日 请选择生日

\*身高 请选择身高 (厘米)

\*体重 请选择体重 (千克)


保存

输入会员信息后点击“保存”

# 添加会员



新增用户会显示在会员列表中

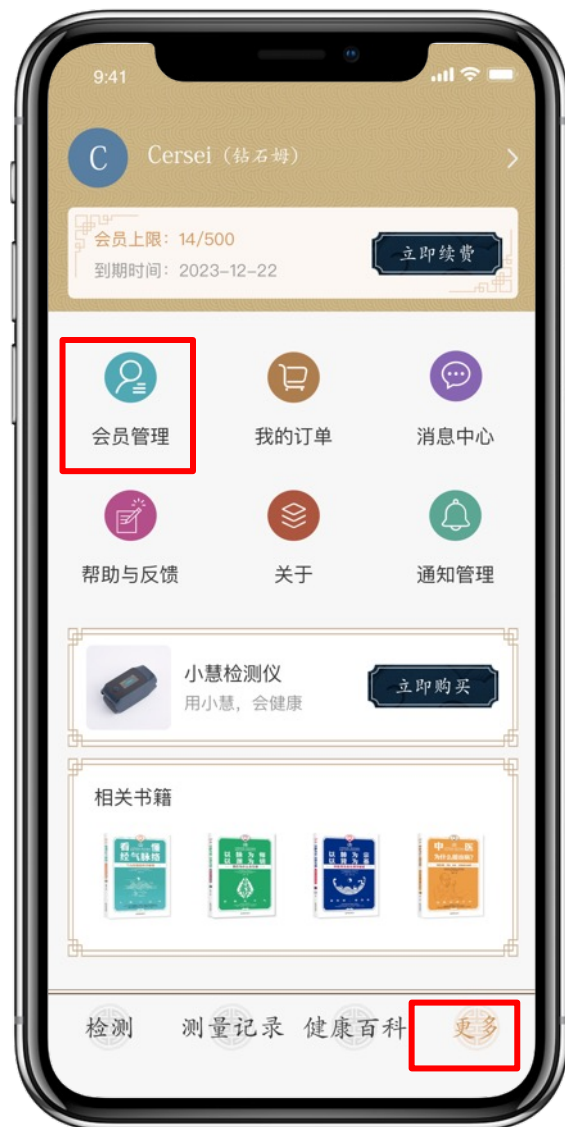

## 方式二

点击“更多”进入更多页面

点击“会员管理”进入会员列表

# 添加会员



点击右上角“添加会员”按钮

更多

更多



点击“更多”进入更多页面  
查看当前的软件版本、客户上限  
和服务到期时间

更多



点击“相关书籍”可直接购买




更多



点击“会员管理”进入会员列表

更多

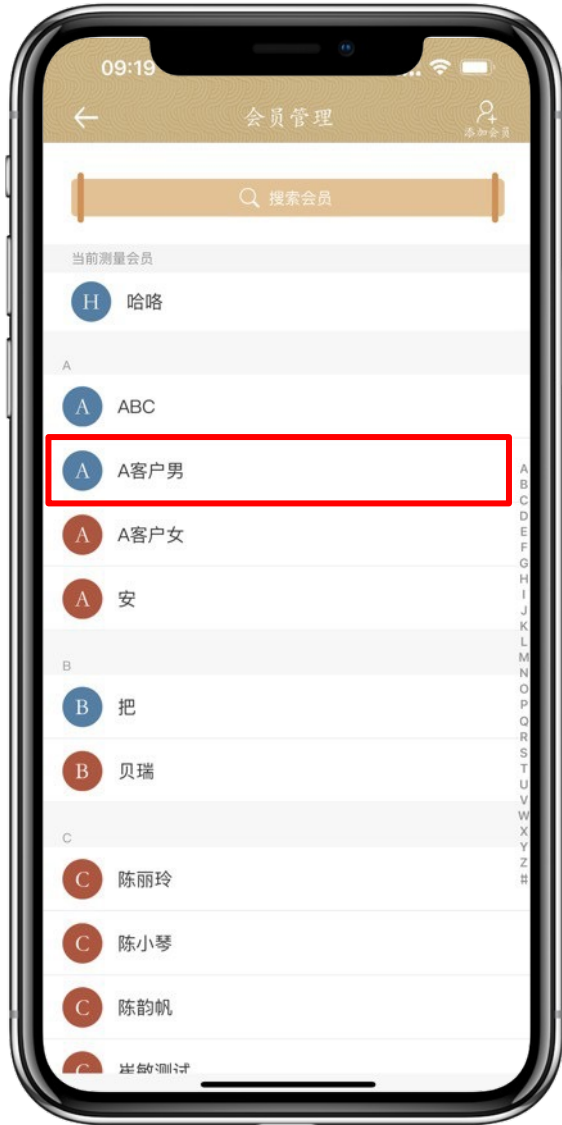

点击想查看的会员

更多



可以在此删除会员、修改资料  
或查看会员历史记录