# 慧脉药 使用说明





查看报告的第一种方法,就是在慧脉药APP中点 击最下方"测量记录",进入测量记录页面, 点击"会员测量记录"图标,即可查找散客历 史测量记录

注意:

搜索一栏可以选择日期快速搜索

每一条记录的日期左方图标代表检测时是用的 左手/右手



# 在慧脉药APP中点击最下方"测量记录"

#### 进入测量记录页面

#### 点击"VIP会员测量记录"图标

#### 进入常客档案页面

#### 选择当前需要查看的常客档案

查看报告-方法1



## 点击"体质报告"按钮

## 可查看当前常客的体质报告

## 如当前非应激态检测报告不足五份

# 则暂时无法出具体质报告

🍓 慧脉药	商品管理				金姆健康 账号服务有效期: 2023-05-13 🗸 🖂
₩ 概况	Q 输入VIP会员名/手机号搜索VIP会员	VIP会员上限: 11/1000			
📯 员工管理					
○ 商品管理	VIP会员姓名	手机号	出生日期	性别	操作
≦ 商品推荐方案	从总	13820972701	1984-6-15	男	编辑 删除 测量记录
	黄丹丹	13894815879	1987-10-10	女	编辑 删除 测量记录
三 会员记录	蒋路生	13766255878	1980-3-14	男	编辑 删除 测量记录
	kaiwen	13262699670	1997-6-15	男	编辑 删除 测量记录
	康春林	13576892002	1980-6-15	女	編辑 删除 测量记录
	李琳	19975123857	1995-10-18	女	編辑 删除 測量记录
	王家俊	18702129108	1992-11-14	男	编辑 删除 测量记录
	xty	15950533805	1998-4-25	男	編辑 删除 测量记录
	赵梦秋	15770636766	1981-10-23	男	編辑 删除 測量记录
	赵琪	18761808772	1980-6-15	女	編辑 删除 测量记录
	朱珠	13861031555	1985-10-13	女	編辑 测量记录

查看报告的第二种方法,是在电脑浏览器中打开商户后台管理系统,点击左侧菜单栏中的"VIP会员管理",进入常客管理页面。可在页面上方搜索VIP会员名或手机来查找VIP会员,也可在VIP会员信息右侧点击编辑或删除。如需查看VIP会员测量记录请点击"测量记录"按钮。



点击"查看"按钮查看您想阅览的测量记录

🌸 慧脉药	商品管理					金姆健康 账号服务有效期: 2023-05-13 🗸 🖂
₿ 概況	Q 输入报告编号搜索测量记录	搜索			□ 请选择开始日期	自请选择结束日期 筛选
∞ 员工管理						
○ 商品管理	报告编号	測量时间	测量手	性别	年龄	操作
≧ 商品推荐方案	c2j1rmu8j3kt6jltheqg	2021-05-20 16:29:16	左	四	1644岁	26
♀。VIP会员管理	c2ivume8j3kt6jltheog	2021-05-20 14:19:06	左	男	16-44岁	童宿
目 会员记录	c2ivpaadtk6ve52m9qp0	2021-05-20 14:07:37	左	男	16-44岁	26
	c2id3agmeu8q93v60grg	2021-05-19 16:51:54	左	文	16-44岁	26
	c2ibn3idtk6ve52m9qh0	2021-05-19 15:17:34	左	文	16-44岁	童有
	c2ibicomeu8q93v60gqg	2021-05-19 15:07:32	左	女	16-44岁	21
	c2i964gmeu8q93v60gng	2021-05-19 12:24:50	左	女	16-44岁	26
	c2i8ij68j3kt6jlthefg	2021-05-19 11:43:08	左	女	16-44岁	26
	c2i84bqdtk6jsrgq3uv0	2021-05-19 11:12:48	左	男	16-44岁	26
	c2i7puadtk6jsrgq3uu0	2021-05-19 10:50:33	左	女	16-44岁	26
	c2i7mr2dtk6jsrgq3ut0	2021-05-19 10:43:56	左	男	16-44岁	26
	c2i7m9omeu8kais3ip80	2021-05-19 10:42:47	左	女	16-44岁	26

点击左侧菜单栏中的"会员管理",进入会员管理页面 点击"查看"按钮查看您想阅览的散客测量记录