

# 第一天培训学习资料


## 一、原理

### 气血共振原理

## 二、发明人

### 王唯工教授

- 中国台湾
- 约翰霍普金斯大学生物物理博士
- 有关脉诊十本著作
- 近百篇与中医脉诊相关的国际论文
- 脉诊发明贡献收录于MARQUIS世界名人录)

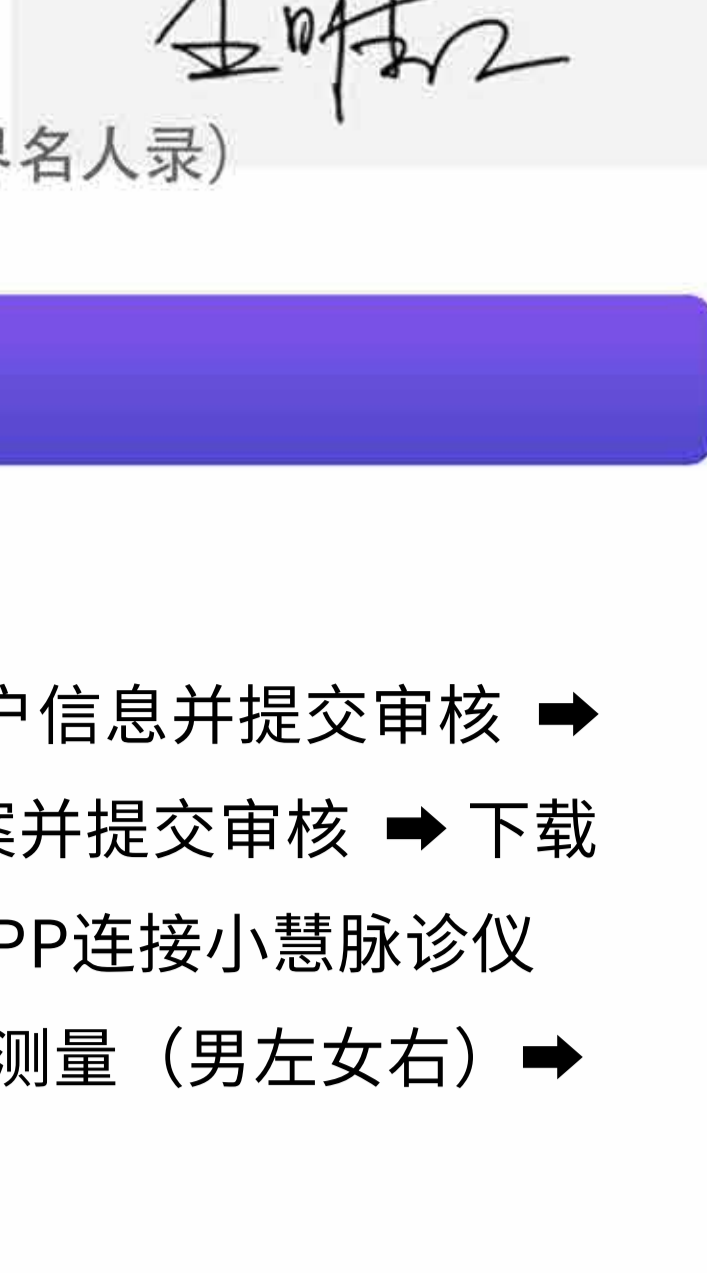

## 三、测量方法

### 1.操作步骤:

登录商户后台管理系统 → 上传商户信息并提交审核 → 添加员工 → 添加商品 → 创建方案并提交审核 → 下载手机APP → 用员工账号登录 → APP连接小慧脉诊仪 → 选择常客或散客 → 选择左右手测量（男左女右） → 查看检测报告

(注: 可查看慧脉药步骤1、2、3)

### 2.测量要点:

必须端坐, 双手平放桌面, 双脚自然下垂落地 (不可跷腿、抖腿), 食指朝下伸进小慧脉诊仪, 过程中尽量放松, 正常呼吸, 不可说话不可移动。

3.心率太快、脉搏波不规整为无效测量, 需重新检测。

4.16周岁以下儿童不可测量。

## 四、测量报告包含的内容



可添加给测量者看的备注和员工备注

经络柱状图


脏腑辨证

传统指数小结

商户信息



理疗报告

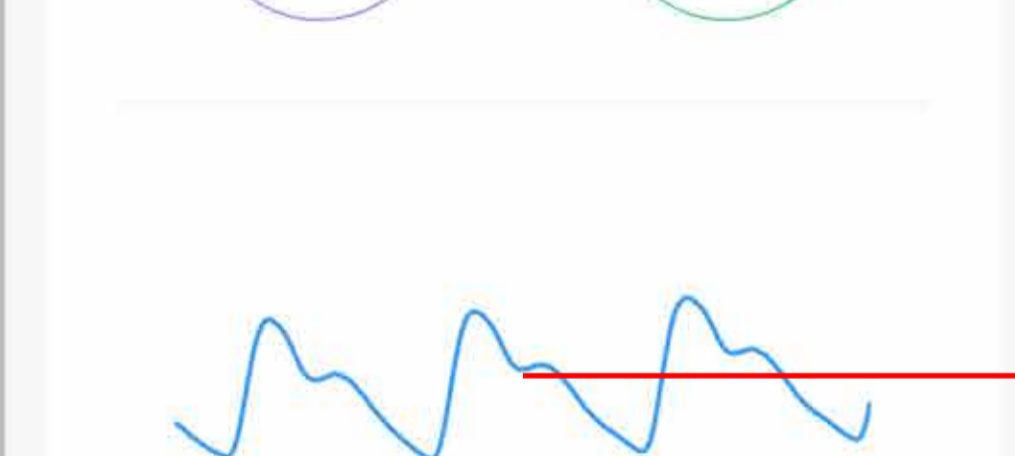

心率与血氧饱和度

局部脉搏波形图

风险评估

健康指数小结



调理建议 (可在商户后台管理系统自己编辑方案)

